

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

- Kobiet w ciąży, u których może wystąpić ryzyko wywołania porodu.
- Pacjentów ze złośliwymi guzami (gdzie może wystąpić ryzyko nasilenia się objawów).
- Pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może spowodować uszkodzenie ciała:

1. Igły do akupunktury marki SEIRIN przeznaczone są do użytku wyłącznie przez upoważnionego lekarza.
2. Igły do akupunktury marki SEIRIN są sterylne i przeznaczone do jednorazowego użytku. Po użyciu igłę należy wyrzucić w przeznaczonym do tego miejscu.
3. Nie należy używać igły, jeśli blister, w który została zapakowana, jest uszkodzony, przebarwiony lub jeśli zerwano papierowe zamknięcie. Indywidualne opakowanie każdej igły zapewnia jej sterylność.
4. Należy zawsze sprawdzić datę przydatności igły do użycia. Nie należy używać igieł po upływie daty przydatności do użycia.
5. Należy zachować ostrożność przy używaniu igieł w przypadku pacjentów mających alergię na stalowe igły.
6. Igły należy wkuwać na głębokość mniejszą niż 2/3 średnicy igły. W przypadku igieł nr 01 (śr. 0,14) lub cieńszych głębokość wkłucia powinna być mniejsza niż 1/2 średnicy igły.
7. Do terapii domięśniowej należy używać igieł nr 2 (śr. 0,18) lub grubszych. Podczas terapii z użyciem igieł pacjent powinien być zrelaksowany. Napięcie lub skurcz mięśni oraz kaszel mogą doprowadzić do pęknięcia igły.
8. W przypadku problemów z usunięciem igły należy najpierw wymasować mięsień i zrelaksować pacjenta. Należy spróbować wyjąć igłę powoli, prostopadłe do skóry. Przy wyciąganiu igły nie należy jej przekręcać, wyginać ani stosować siły, ponieważ może to doprowadzić do pęknięcia igły.
9. Do moksoterapii należy używać tylko igieł z metalowymi uchwytami typu L lub M.
10. Nadmierna stymulacja prądem elektrycznym może doprowadzić do pęknięcia igły z powodu jej korozji lub silnego skurczu mięśnia.
11. Igły należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, środków chemicznych, podwyższonej wilgotności i wysokiej temperatury.

Podczas używania jako elektrody:

Nadmierna stymulacja elektryczna (ponad 100 Hz, ponad 1 mA rms lub ponad 1 C na jeden zabieg) może spowodować złamanie igły wywołane korozją igły lub silnymi skurczami mięśni.

Głębokość wprowadzenia powinna wynosić 10 mm lub więcej.

Nie używaj igieł Gauge nr 2 (ø 0,18) lub cieńszych ani igieł o długości 15 mm.

(Uważaj na głębokość i kąt wprowadzenia, aby uniknąć uszkodzenia organów i nerwów.)

Przez cały czas trwania zabiegu elektrycznej stymulacji monitoruj igły, tak aby mieć pewność że nie nastąpi żadna zmiana w stanie wprowadzenia.

Za duża głębokość wprowadzenia prowadzi do uszkodzenia organów i nerwów, a zbyt płytkie wprowadzenie igły powoduje korozję igły lub uszkodzenia tkanek.

Zawsze odnieś się do instrukcji obsługi urządzenia do elektrycznej stymulacji.



Manufacturer :
SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku,
Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan
<http://www.seirin.jp>

Dist by : SEIRIN-America, Inc.
230 Libbey Parkway Weymouth,
MA 02189 U.S.A.
<http://www.seirinamerica.com>



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands



STERILE EO