


# やさしいはりごち

# Zero

## パイオネックス・ゼロ

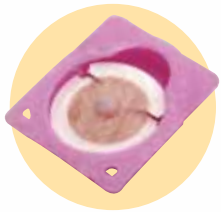

「パイオネックス」シリーズから、  
皮膚に刺入しない接触タイプの「パイオネックス・ゼロ」が新登場。  
鍼先がない、押圧による刺激ですので、  
患者様のセルフケアにも安全にご使用いただけます。



## 治療後のケアにも活用


刺入タイプのパイオネックスでは、貼ったまま患者様を帰宅させるのに不安を感じられるという声がありました。  
パイオネックス・ゼロなら刺入しない接触タイプなので安心です。

## 幅広い患者様にも安心

幼児や今まで鍼を怖がっていた患者様にもアプローチでき、  
施術対象の幅を広げることができます。  
パイオネックス・ゼロから従来の刺入タイプの  
パイオネックスへの移行も期待できます。



カラー	サイズ(mm)	一般医療機器 セイリンテープ付接触器 届出番号:22B1X00006000004
バイオレット	0.30	

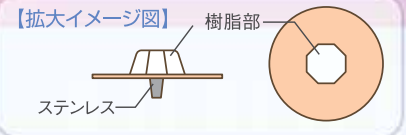

## パイオネックス・ゼロの貼付手順

- シール紙を開けてイラスト図の様に取り出します
- 貼付したい場所にイラスト図の様に貼ります
- 残った片側の台紙を剥がし貼り付けます
- 最後に軽くテープを押えます



### 【使用上の注意】

- ・ご使用にあたっては、機器に異常がないか確認してからご使用してください。
- ・使用中、接触部分が皮膚を傷付けることがあります。
- ・その際は、剥がした後の傷跡を化膿防止のために消毒し、掻かないようにしてください。
- ・固定部は凸部となっていますので、衣類等に引っかからないようにご注意ください。
- ・本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- ・アレルギー体質の方は使用を避けてください。
- ・ご使用中場合によっては、痛みや疲労感を増す事があります。刺激が強すぎる可能性もありますので、念の為すべて本品を剥がしてください。
- ・従前の状態に戻った時は、貼り付ける枚数を少なく、ご使用ください。
- ・ご使用后、皮膚に貼り付け跡が残る事がありますが、通常は数日で消えます。
- ・入浴前に本品を外し、入浴後に改めて新しいものに貼りかえてください。
- ・本品を廃棄する場合には、お住まいの区市町村の廃棄方法に従って廃棄してください。

■製造販売元

 **セイリン株式会社**

ISO13485 認証取得

〒424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町1007-1  
TEL.054-365-5700 FAX.054-365-5139  
<http://www.seirin.tv>

 **0120-100890**  
(通話料無料ダイヤル)