



使用方法



1 炭化艾のセット
(ラック灸500の場合)
炭化艾の穴側と外側をピンセットで掴むとセットしやすくなります。

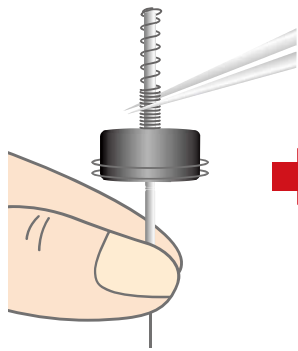


2 ラック灸のセット
刺入した鍼の鍼柄に本製品をセットしてください。その際、鍼柄を指で持つとセットしやすくなります。

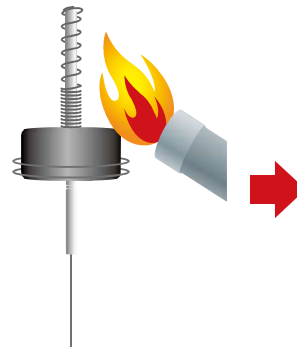


3 点火
炭化艾の上の方を着火装置などで点火してください。また、鍼体に炎が当たらないよう注意してください。



4 ラック灸の燃焼
点火して燃え尽き、鍼柄が冷めるまで6分程かかります。

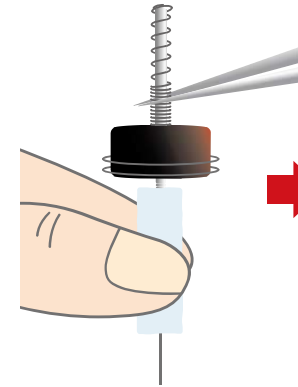

5 ラック灸の取外し
鍼から取り去る時は、熱くなっていますので、直接手で触れずピンセットなどを使用してください。鍼が抜けないように鍼体を綿花等で持って外すと安全です。

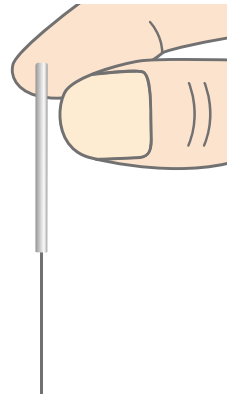

6 抜鍼
鍼柄が十分に冷めてから抜鍼してください。