

粒のちからでコリを緩和！

■安全設計

個別包装され開封まで無菌維持された商品です。1枚のテープに接触部を固定しているため、接触部が取れる心配はほとんどありません。

■衛生的

指がテープの粘着面に触れることがないように、独自の工夫を施しましたので、衛生的にご使用いただけます。

■皮膚にやさしい

テープは通気性の良い肌にやさしいテープを使用しています。ムレたり、かぶれたりすることが少なく、しかもはがれにくく、皮膚にぴったり密着します。

■品質管理

国内一貫生産のもと、ISO13485:2003を認証取得し、徹底した品質管理体制を確立しております。

使用上の注意


- 肌に傷、湿疹などのある所には使用しないでください。
- 目の周囲及び粘膜部分には使用しないでください。
- 一度使ったこりスポットを貼り直すとテープがはがれやすくなりますので貼り直しはしないでください。
- 入浴する前にはこりスポットを外し、入浴後改めて新しいこりスポットを貼ってください。
- 本品の使用によって皮膚に発疹、発赤、かゆみ等、通常とは異なる反応を示したり、感じた場合は使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 伸縮性に優れたテープではありません。テープがはがれやすくなる可能性がありますので貼る部分の筋肉、皮膚を伸ばした状態で貼るようにしてください。
- お子様を使用する際は、保護者のもとで使用し、目や口に入らないように十分注意してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

警告

- ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。

使用方法

1

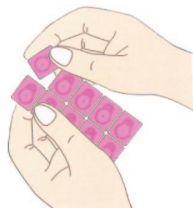


無菌維持された個別包装のケースを1つ取りはずします。

2




シール紙をはがします。

3

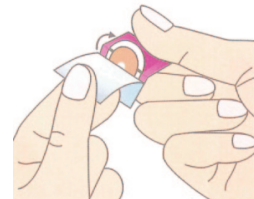

カートリッジを山折にします。

4

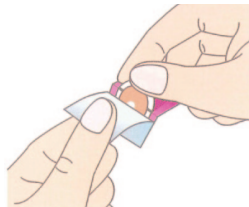

テープと共に台紙(扇形のシート)を指ではさみ、つまみあげてください。

5



台紙のついた状態で皮膚に貼付してください。


6



貼付後、残っている台紙を外し、上から軽く押さえて確実に貼付してください。

コリの緩和ポイント

コリ・痛みなどを感じる部位を指で押して、痛みなどを感じる部位に貼付すると効果的です。

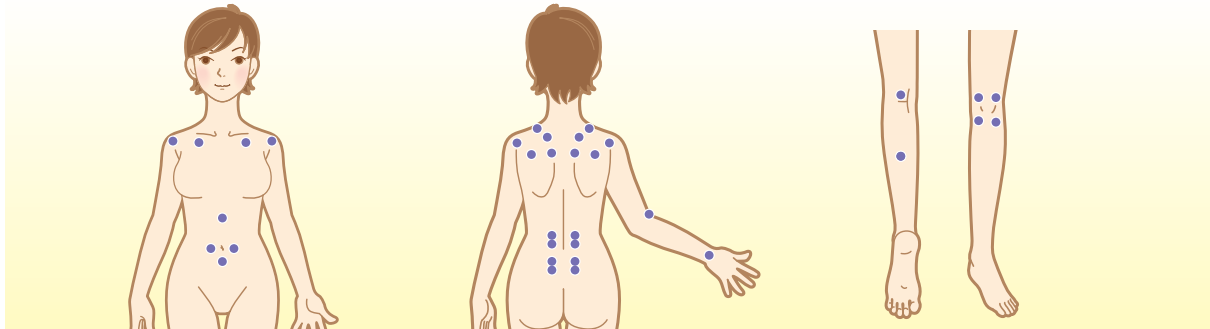

一般医療機器

医療機器届出番号：22 B1X 00006000005

一般の名称：家庭用貼付型接触粒

販売名：こりスポット

使用目的：コリの部分に貼付する事により圧迫しコリの緩解をする

入数：20本入

接触部材料：樹脂

製造販売業者：セイリン株式会社
静岡県静岡市清水区袖師町1007-1

お問い合わせ先：054-365-5380

受付時間 9時から17時まで
(土・日・祝日を除く)