

セイリン ラック灸 (灸頭鍼用)

お灸を安全かつ効果的に行うため、当製品の使用に際し必ずよく読んで、その内容を十分理解した上で行ってください。また、この説明書は製品を使いきるまで製品と一緒に保管してください。

まえがき

- この製品は、医師及びはり・きゅう師以外の人は使用しないでください。
- お灸は肌の上でもぐさを燃やす治療法ですので、万が一にも火傷を嫌う方には使用しないでください。
- 今までの灸頭鍼と熱のタイプが違いますので、治療家自身で体験し熱特性を十分理解した上でご使用ください。

特徴

○煙がほとんどない ○臭いが少ない ○取扱が簡単 ○軽い ○使い捨てで清潔




注意

鍼及び専用キャップが熱を持っている時に触れると火傷します。
金属鍼柄の鍼(太さ 3 番以上・鍼が倒れる事が無く置鍼できる・皮膚面から 3cm 以上確保できる)を使用してください。


使用方法

① ラック灸のセット

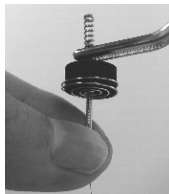

刺入した鍼の鍼柄にセットする際、鍼柄を指で持つとセットしやすくなります。

② 点火

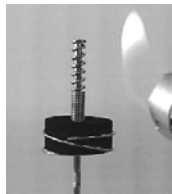


炭化艾の上の方を着火装置などで点火してください。また、鍼体に炎が当たらないよう注意してください。

③ ラック灸の燃焼・取外



鍼柄がさめるまで6分くらいかかります。鍼柄から取り去る時は、直接手で外さずピンセット等を使用してください。また、同時に鍼が抜けないように鍼体を乾綿などで持って外すと安全です。


④ 抜鍼

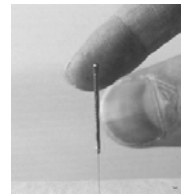

鍼柄が十分に冷めてから抜鍼してください。

使用上の注意

- 灸頭鍼以外の目的で使用しないでください。
- * ○ ご使用の際は、当社製造のLタイプおよびMタイプを使用してください。
- 事前にキャップが鍼柄にしっかり入るか確認してから使用してください。
- 炭化艾の落下に備え、念のため患者の皮膚面に防護措置をしてください。
- 炭化艾の下側から点火しないでください。
- 線香での点火はしにくい為、充分な注意を払い着火装置などで点火してください。
- できるだけ鍼が垂直になる状態で使用してください。
- 使用する前に炭化艾にヒビが入っていないか確認しヒビの入ったものは落下の恐れがあるので使用しないでください。
- 皮膚から 3cm 以上離してご使用ください。
- 顔など皮膚が弱い部位には使用しないでください。
- 熱を強く感じない方でも低温火傷を生じることがあります。また、皮膚の弱い部位は、低温火傷が生じやすくなりますのでご注意ください。
- 付属の炭化艾以外を用いた場合、不具合を生じますので使用しないでください。
- 本製品の使用後は、自治体の指示にもとづいて廃棄してください。
- 室内の換気に充分ご注意ください。

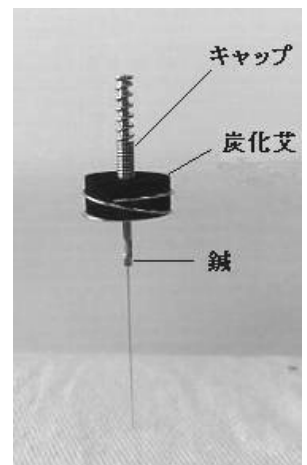

保管上の注意

- 炭化艾はこすると粉を出しますので、開封後はできるだけ揺すらないようにしてください。
- 保管にあたっては、湿気が少なく匂いのない場所に説明書と一緒に保管してください。
- 炭化艾は、湿気や匂いを吸収しやすいので、長期の保存に適しておりませんので早めに使用してください。

セイリン ラック灸500 (灸頭鍼用)

お灸を安全かつ効果的に行うため、当製品の使用に際し必ずよく読んで、その内容を十分理解した上で行ってください。また、この説明書は製品を使いきるまで製品と一緒に保管してください。

まえがき

- この製品は、医師及びはり・きゅう師以外の人は使用しないでください。
- お灸は肌の上でもぐさを燃やす治療法ですので、万が一にも火傷を嫌う方には使用しないでください。
- 今までの灸頭鍼と熱のタイプが違いますので、治療家自身で体験し熱特性を十分理解した上でご使用ください。

特徴

- 煙がほとんどない
- 臭いが少ない
- 取扱が簡単
- 軽い



注意

鍼及び専用キャップが熱を持っている時に触れると火傷します。
金属鍼柄の鍼(太さ 3 番以上・鍼が倒れる事が無く置鍼できる・皮膚面から 3cm 以上確保できる)を使用してください。


使用方法

①炭化艾のセット




炭化艾の穴側と外側をピンセットで掴むとセットしやすくなります。

②ラック灸のセット

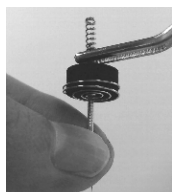

刺入した鍼の鍼柄にセットする際、鍼柄を指で持つとセットしやすくなります。

③点火

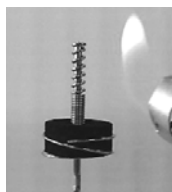


炭化艾の上の方を着火装置などで点火してください。また、鍼体に炎が当たらないよう注意してください。

④ラック灸の燃焼・取外



鍼柄がさめるまで 6 分くらいかかります。鍼柄から取り去る時は、直接手で外さずピンセット等を使用してください。また、同時に鍼が抜けないように鍼体を乾綿などで持って外すと安全です。


⑤抜鍼

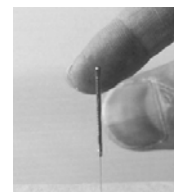

鍼柄が十分に冷めてから抜鍼してください。

使用上の注意

- 灸頭鍼以外の目的で使用しないでください。
- ご使用の際は、当社製造のLタイプおよびMタイプを使用してください。
- 事前にキャップが鍼柄にしっかり入るか確認してから使用してください。
- 炭化艾の落下に備え、念のため患者の皮膚面に防護措置をしてください。
- 炭化艾の下側から点火しないでください。
- 線香で点火出来ないため、十分な注意を払い着火装置などで点火してください。
- できるだけ鍼が垂直になる状態で使用してください。
- 使用する前に炭化艾にヒビが入っていないか確認し、ヒビの入ったものは落下の恐れがあるので使用しないでください。
- 皮膚から 3cm 以上離してご使用ください。
- 顔など皮膚が弱い部位には使用しないでください。
- 熱を強く感じない方でも低温火傷を生じることがあります。また、皮膚の弱い部位は、低温火傷が生じやすくなりますのでご注意ください。
- 付属の炭化艾以外を用いた場合、不具合を生じますので使用しないでください。
- 付属の炭化艾を 2 個乗せて使用しないでください。
- * ○ 錆の発生に繋がりますので、使用したキャップは洗わないで下さい。
- * ○ キャップを使用してから 1ヶ月以上あけて再使用する場合、錆が発生している場合があります。破損の恐れがありますので、新しいキャップを使用してください。
- 本製品の使用後は、自治体の指示にもとづいて廃棄してください。
- 室内の換気に充分ご注意ください。

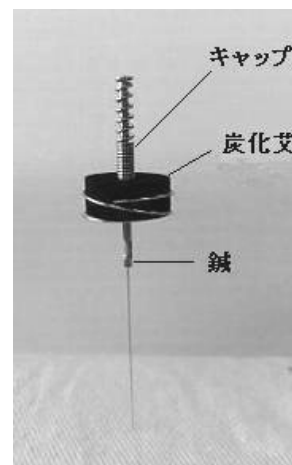

保管上の注意

- * ○ 使用したキャップは洗わず、湿気が少ない場所で保管し、出来るだけ早めに使用してください。
- 炭化艾はこすると粉を出しますので、開封後はできるだけ揺すらないようにしてください。
- 保管にあたっては、湿気が少なく匂いのない場所に説明書と一緒に保管してください。
- 炭化艾は、湿気や匂いを吸収しやすいので、長期の保存に適していませんので早めに使用してください。