

# やさしいはりごち

# Zero

## パイオネクス・ゼロ


パイオネクス・ゼロは鍼先がないため皮膚に刺入しません。  
接触タイプの押圧による刺激です。

### 幅広い患者様に

幼児や今まで鍼を怖がっていた患者様にもアプローチでき  
施術対象の幅を広げることができます。

### 治療後のケアに

治療後のケアにご使用される際、  
刺入するパイオネクスでは不安を感じるという場合には、  
接触タイプのパイオネクス・ゼロをおすすめします。

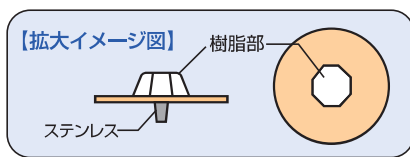


カラー	サイズ(mm)	単回使用医療器 一般医療機器 セイリンテープ付接触器
バイオレット	0.30	届出番号:22B1X00006000004

セイリン鍼は国内一貫生産の日本製です。

### パイオネクス・ゼロの貼付手順

- 1 シール紙を開けてイラスト図の様に  
取り出します
- 2 貼付たい場所にイラスト図の様に  
貼ります
- 3 残った片側の台紙を剥がし  
張り付けます
- 4 最後に軽くテープを  
押えます

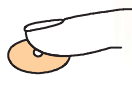

#### 【使用上の注意】

- ・ご使用にあたっては、機器に異常がないか確認してからご使用してください。
- ・使用中、接触部分が皮膚を傷つけることがあります。その際は、剥がした後の傷跡を化膿防止の為に消毒し、搔かないようにしてください。
- ・固定部は凸部となっておりますので、衣類等に引っかからないようにご注意ください。
- ・本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- ・アレルギー体質の方は使用を避けてください。
- ・ご使用中場合によっては、痛みや疲労感を増す事があります。刺激が強すぎる可能性もありますので、念の為すべて本品を剥がしてください。
- ・従前の状態に戻った時は、貼り付ける枚数を少なく、ご使用ください。
- ・ご使用后、皮膚に貼り付け跡が残る事がありますが、通常は数日で消えます。
- ・入浴前に本品を外し、入浴後に改めて新しいものに貼りかえてください。
- ・本品を廃棄する場合には、お住まいの区市町村の廃棄方法に従って廃棄してください。

■製造販売業者

**セイリン株式会社**

ISO13485 認証取得

〒424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町1007-1  
TEL.054-365-5700 FAX.054-365-5139  
<http://www.seirin.tv>

☎ 0120-100890  
(通話料無料ダイヤル)

