

# セイリン ラック灸 (灸頭鍼用)

本製品を安全かつ効果的に行うため、本製品の使用に際し必ずよく読んで、その内容を十分理解した上で行ってください。また、この説明書は本製品を使いきるまで本製品と一緒に保管してください。

## まえがき

- 本製品は、医師及びはり・きゅう師以外の人は使用しないでください。
- お灸は肌の上でもぐさを燃やす治療法ですので、万が一にも火傷を嫌う方には使用しないでください。
- 今までの灸頭鍼と熱のタイプが違いますので、治療家自身で体験し熱特性を十分理解した上でご使用ください。

## 特徴

- 煙がほとんどない
- 臭いが少ない
- 取扱が簡単
- 軽い
- 使い捨てで清潔




注意

鍼及び専用キャップが熱を持っている時に触れると火傷します。  
金属鍼柄の鍼(太さ 3 番以上・鍼が倒れる事が無く置鍼できる・皮膚面から 3cm 以上確保できる)を使用してください。


## 使用方法

### ① ラック灸のセット

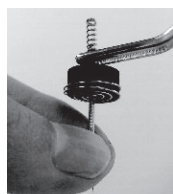


刺入した鍼の鍼柄にセットする際、鍼柄を指で持つとセットしやすくなります。

### ② 点火

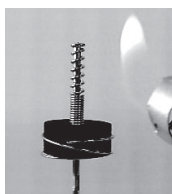

\*\*キャップ頭部に炎が当たらないように、着火装置などで炭化艾の上の方を点火してください。また、鍼体に炎が当たらないよう注意してください。

### ③ ラック灸の燃焼・取外

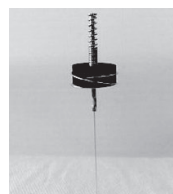

鍼柄がさめるまで6分くらいかかります。鍼柄から取り去る時は、直接手で外さずピンセット等を使用してください。また、同時に鍼が抜けないう鍼体を乾綿などで持って外すと安全です。

### ④ 抜鍼



鍼柄が十分に冷めてから抜鍼してください。

## 使用上の注意

- 灸頭鍼以外の目的で使用しないでください。
- **\*\*当社の金属鍼柄の鍼をご使用ください。**
- 事前にキャップが鍼柄にしっかり入るか確認してから使用してください。
- できるだけ鍼が垂直になる状態で使用してください。
- 炭化艾の落下に備え、念のため患者の皮膚面に防護措置をしてください。
- 炭化艾の下側から点火しないでください。
- 線香での点火はしにくい為、十分な注意を払い着火装置などで点火してください。
- 使用する前に炭化艾にヒビが入っていないか確認しヒビの入ったものは落下の恐れがあるので使用しないでください。
- 皮膚から 3cm 以上離してご使用ください。
- 顔など皮膚が弱い部位には使用しないでください。
- 熱を強く感じない方でも低温火傷を生じることがあります。また、皮膚の弱い部位は、低温火傷が生じやすくなりますのでご注意ください。
- 付属の炭化艾以外を用いた場合、不具合を生じますので使用しないでください。
- 本製品の使用後は、自治体の指示にもとづいて廃棄してください。
- 室内の換気に充分ご注意ください。

## 保管上の注意

- 炭化艾はこすれると粉を出しますので、開封後はできるだけ揺すらないようにしてください。
- 保管にあたっては、湿気が少なく匂いのない場所に説明書と一緒に保管してください。
- 炭化艾は、湿気や匂いを吸収しやすいので、長期の保存に適しておりませんので早めに使用してください。

