

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

\*2018年3月(第2版)  
2016年5月(第1版)

届出番号:22B1X00006000007

機械器具 80 はり又はきゅう用器具  
一般医療機器 非侵襲式家庭向け鍼用器具 JMDNコード 34675001

再使用禁止


## やさしい「はり」ごこち

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>

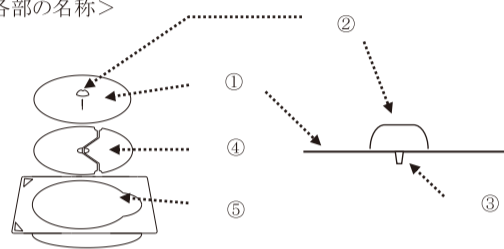

	構造名称
①	*テープ(アクリル系粘着剤使用)
②	固定部
③	接触部(ステンレス)
④	台紙
⑤	包装容器(カートリッジ)

<仕様>


接触部に目視にて確認できるキズ・割れ及び皮膚に引っかかるバリがない事。

### 【使用目的又は効果】

家庭ではり治療に使用するため、身体に刺入せず皮膚に貼付する器具をいう。

### 【使用方法等】

- ・貼る前に、皮膚の脂や汗をよく拭いて下さい。
- ・治療点は、個人差があります。治療点(経穴・ツボ)やコリ、痛みのある部分を指等で押し、よく感じる箇所貼って下さい。

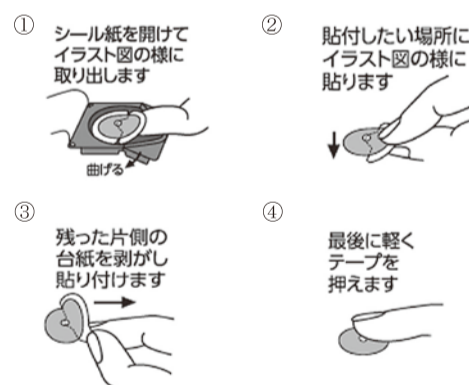

### 【使用上の注意】

<使用注意(次の患者には慎重に適用すること)>

- ・妊婦[陣痛を誘発するおそれがある]
- ・悪性腫瘍を有する患者[悪性腫瘍の成長、転移を促進させるおそれがある]
- ・ニッケル及びクロム等のステンレス成分に対する金属アレルギーを有する患者

<重要な基本的事項>

- ・ご使用にあたっては、機器に異常がないか確認してからご使用して下さい。
- ・使用中、接触部分が皮膚を傷付ける事があります。その際は、剥がした後の傷跡を化膿防止の為に消毒し、掻かないようにして下さい。
- ・固定部は凸部となっていますので、衣類等に引っかからないようにご注意下さい。
- ・本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。
- ・アレルギー体質の方は使用を避けて下さい。
- ・ご使用中場合によっては、痛みや疲労感を増す事があります。刺激が強すぎる可能性もありますので、念の為すべて本品を剥がして下さい。従前の状態に戻った時は、貼り付ける枚数を少なくし、ご使用下さい。
- ・ご使用后、皮膚に貼り付け跡が残る事がありますが、通常は数日で消えます。
- ・本品を廃棄する場合には、お住まいの区市町村の廃棄方法に従って廃棄して下さい。

### 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質で汚染される可能性のある場所を避けて保管してください。

<有効期間>

- ・外箱に記載(自己認証による)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： セイリン株式会社  
住 所： 〒424-0037  
静岡県静岡市清水区袖師町 1007-1  
お問合せ番号： 054-365-5380  
受付時間 9時から17時  
(土・日・祝日を除く)

製造業者： セイリン株式会社

## 取扱説明書

### やさしい「はり」ごこち

#### ■安全設計

個別包装され開封まで無菌維持された商品です。1枚のテープに接触部を樹脂で固定しているため、接触部が取れる心配はほとんどありません。

#### ■衛生的

指がテープの粘着面に触れることがないように、独自の工夫を施しましたので、衛生的にご使用いただけます。

#### ■皮膚にやさしい

テープは通気性の良い医療用テープを使用。ムレたり、かぶれたりすることが少なく、しかも剥がれにくいいため、皮膚にぴったり密着します。

#### ■品質管理

国内一貫生産のもと、ISO13485を認証取得し、徹底した品質管理体制を確立しております。

#### ■使用上の注意


- 肌に傷、湿疹などのある所には使用しないでください。
- 目の周囲及び粘膜部分には使用しないでください。
- 一度使った本品を貼り直すとテープが剥がれやすくなります。貼り直しはしないでください。
- 本品を貼った状態でシャワーや入浴、水泳などをするとテープが剥がれやすくなりますのでご注意ください。
- 貼付した場所が発赤したり、カユミを感じるなど通常と異なる反応を示したり感じた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 伸縮性に優れたテープではありません。テープがはがれやすくなる可能性がありますので貼る部分の筋肉、皮膚を伸ばした状態で貼るようにしてください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。


#### ■警告


- ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。


### 使用方法


- 

無菌維持された個別包装のケースを1つ取りはずします。
- 

シール紙をはがします。
- 

カートリッジを山折にします。
- 

テープと共に台紙(扇形のシート)を指ではさみ、つまみあげてください。
- 

台紙のついた状態で皮膚に貼付してください。
- 

貼付後、残っている台紙を外し、上から軽く押さえて確実に貼付してください。

#### ■一般医療機器

医療機器届出番号：22 B1X 00006000007

一般的名称：非侵襲式家庭向け鍼用器具

販売名：やさしい「はり」ごこち

使用目的：身体に刺入せず皮膚に貼付する器具

入数：20本入

サイズ：0.3mm

接触部材料：ステンレス鋼線

製造販売業者： **セイリン株式会社**  
静岡県静岡市清水区袖師町1007-1

お問い合わせ先： ☎054-365-5380

受付時間 9時から17時まで  
(土・日・祝日を除く)